

VISIERA PARASPRUZZI IN POLICARBONATO

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (cat. I)

ES-3 CE

PRODUTTORE	CAMPO D'IMPIEGO
ES	3

CAMPI D'IMPIEGO DEL PRODOTTO:

Il presente DPI di categoria I, è conforme ai requisiti minimi previsti dalla norma CE EN 166:2001 per la protezione contro la proiezione di liquidi (schizzi, spruzzi e gocce).

RACCOMANDAZIONI PRIMA DELL'USO:

L'utilizzatore prima di procedere all'utilizzo del DPI deve verificare che esso sia adeguato all'uso previsto. Una volta tolto il prodotto dal suo imballo e prima di ogni utilizzo, verificare che sia integro in tutte le sue parti, se così non fosse, sostituirlo con uno nuovo. Per assemblare e regolare il prodotto in base alle proprie esigenze ed evitare di danneggiarlo, seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio riportate sul retro del foglio, che sono parte integrante della presente scheda tecnica. Questo dispositivo di protezione può essere impiegato in combinazione con accessori (ad esempio occhiali da vista) ed altri DPI (ad esempio mascherine di protezione delle vie respiratorie), previo accurata verifica (prima di esporsi al rischio) che l'uso combinato non precluda l'integrità dei singoli dispositivi e/o accessori.

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO :

Per non recare danni alla vista, dovrà essere garantita sempre la massima trasparenza della visiera, pertanto si consiglia di lavarla dopo ogni suo utilizzo o comunque ogni volta che rimangano depositi sulla superficie. Per procedere alla pulizia del dispositivo, smontare la visiera dal cinturino e lavarla con un panno in microfibra pulito, con acqua tiepida e sapone. Per preservare le superfici della visiera, NON utilizzare panni e/o prodotti abrasivi o aggressivi per detergere. Qualora la visiera si opacizzasse per abrasione o per esposizione ad agenti o liquidi corrosivi che ne pregiudichino le caratteristiche intrinseche, il DPI dovrà essere tassativamente sostituito. Dopo aver sgrassato la superficie con il detergente e il panno, qualora si volesse disinfettare la visiera, utilizzare un batuffolo di ovatta assieme ad un disinfettante. Per la pulizia del cinturino utilizzare solo un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida e sapone, NON utilizzare getti d'acqua diretti e/o altri tipi di detergente e/o solventi poiché precluderebbero la tenuta del biadesivo che assicura la tenuta della fascia ergonomica in polietilene espanso e del velcro sul cinturino.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO:

Conservare e riporre la visiera in locale asciutto e temperato, al riparo dalla luce. Non esporre ad una temperatura elevata, come ad esempio dietro ad un parabrezza o una finestra. La conservazione ed il trasporto del prodotto devono essere effettuati nel loro imballaggio originale o in altro avente le stesse caratteristiche, affinché sia garantita l'assenza di sollecitazione meccaniche.

NOTA: I materiali impiegati nella produzione e realizzazione del prodotto, non possiedono proprietà allergeniche note, ciò nonostante, l'utilizzatore dovrà assicurarsi di non essere allergico ad alcuni materiali normalmente riconosciuti come non allergici.

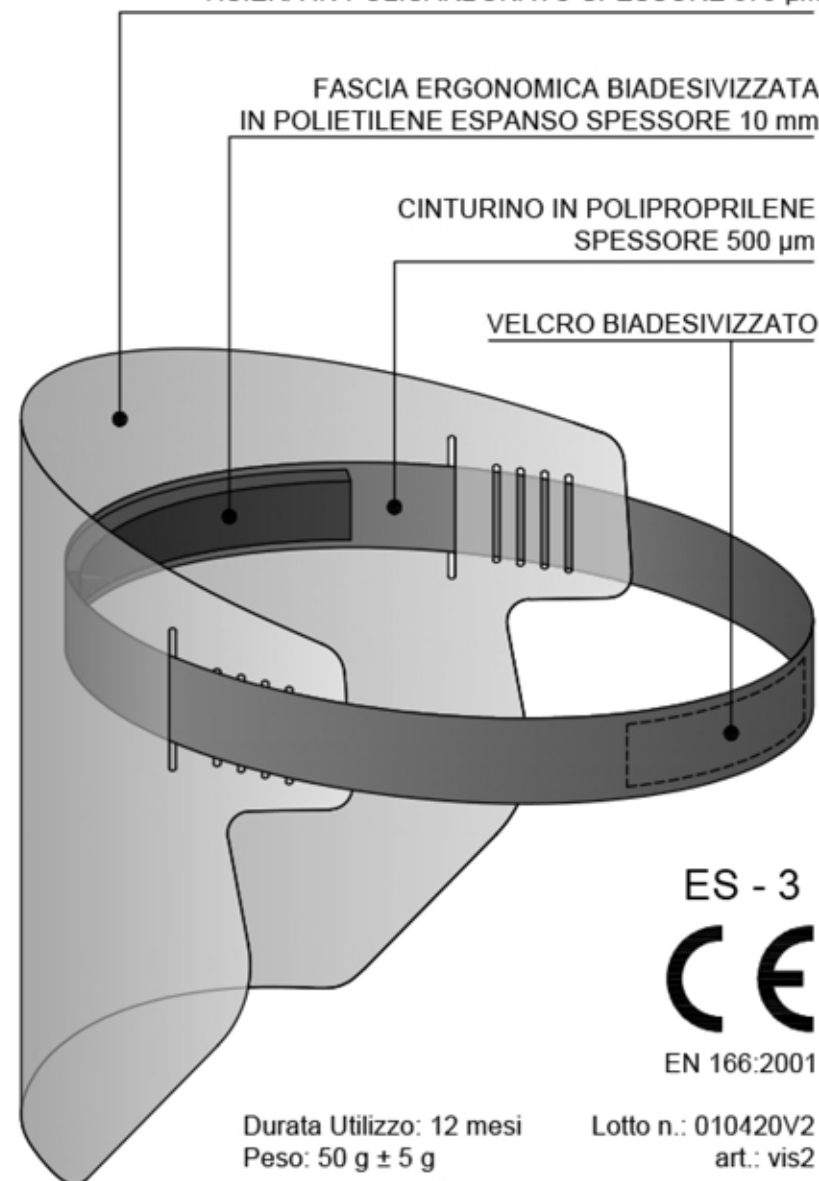
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE PRESENTI INDICAZIONI, NON E' POSSIBILE GARANTIRE LA PROTEZIONE E LA DURATA PREVISTA PER IL PRESENTE DISPOSITIVO

VISIERA IN POLICARBONATO SPESSORE 375 µm

FASCIA ERGONOMICA BIADESIVIZZATA,
IN POLIETILENE ESPANSO SPESSORE 10 mm

CINTURINO IN POLIPROPRILENE
SPESSORE 500 µm

VELCRO BIADESIVIZZATO



ES - 3



EN 166:2001

Durata Utilizzo: 12 mesi

Peso: 50 g ± 5 g

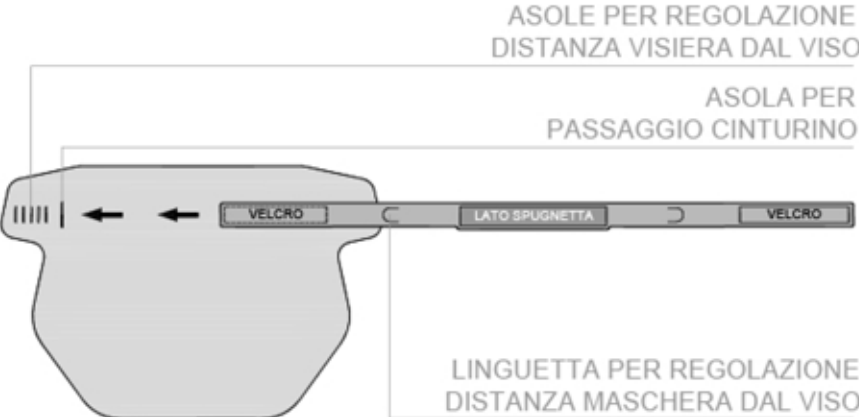
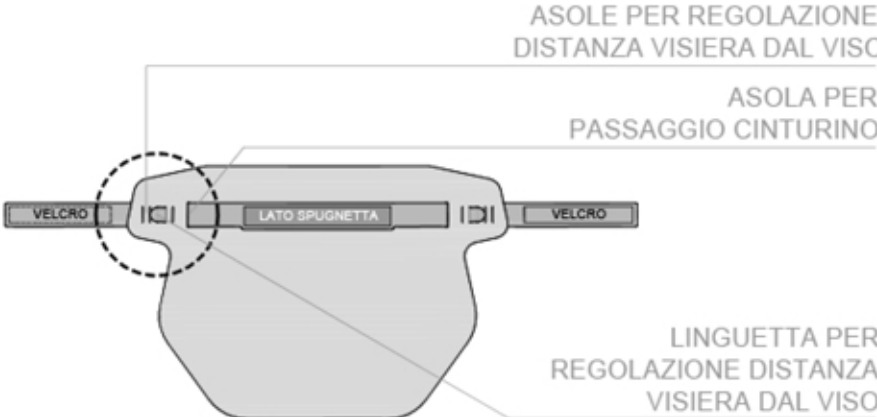
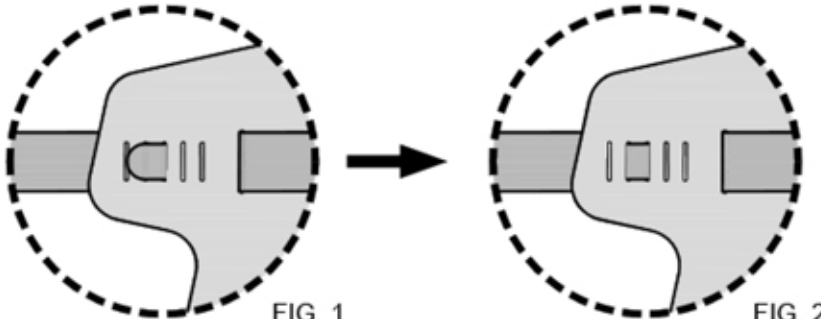
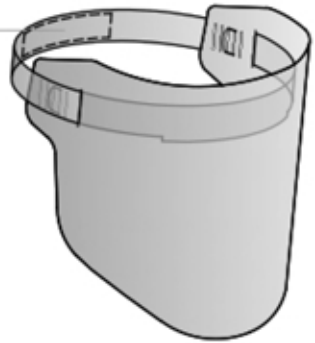
Lotto n.: 010420V2

art.: vis2

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO VISIERA PARASPRUZZI IN POLICARBONATO

ES-3 CE
(DPI cat. I- EN 166:2001)

PRODUTTORE	CAMPO D'IMPIEGO
ES	3

1	Rimuovere le pellicole protettive.	Lotto n.: 010420V2 art.: vis2	Prodotto in Italia da ELIOSTILE S.R.L. P. IVA 00928291004 - C.F. 00757060587 - TEL. 0761/521455 Via Flaminia km 33.700, n. civ 10 - 00068 Rignano Flaminio (RM)
2	<p>Inserire il cinturino nelle asole più interne della maschera (asola grande), tenedo presente che il lato della spugna andrà a contatto con la fronte.</p> 	3	<p>Regolare il cinturino sulla maschera, inserendo le apposite linguette nelle relative asole, da ambedue i lati.</p> 
4	<p>Una volta regolata la giusta distanza (Fig. 1), procedere con il bloccaggio del cinturino inserendo la linguetta nell'asola seguente a quella utilizzata per la regolazione (Fig. 2).</p> 	5	<p>Regolare e bloccare il cinturino alla circonferenza desiderata, utilizzando il velcro (chiusura a strappo), avendo l'accortezza di verificare che il cinturino abbia il lato con la spugna rivolto verso l'interno.</p> 

CE



STAZIONE90
DIVISE DA LAVORO